

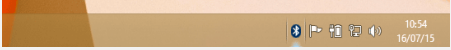
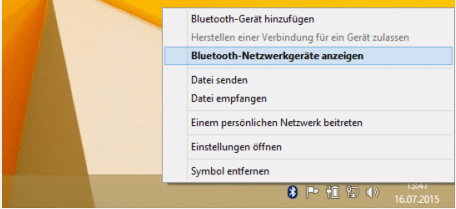
CHALLENGE DISC 2.0 – Readme

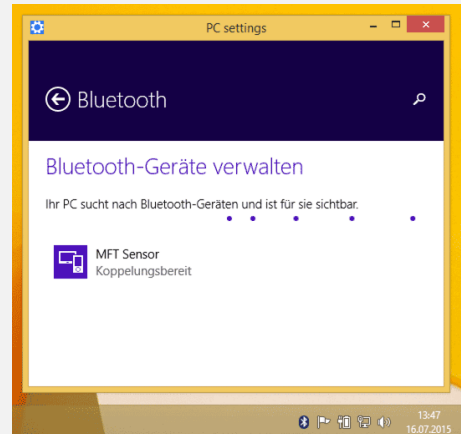
Koppelung von Bluetooth Geräten

Bevor ein Programm unter Windows einen Bluetooth LE Sensor verwenden kann, muss dieser mit dem Betriebssystem gekoppelt werden. Dieser Prozess des "Koppelns" bindet das Gerät an das Betriebssystem, sodass das Gerät in Folge von Anwendungen gefunden und verwendet werden kann.

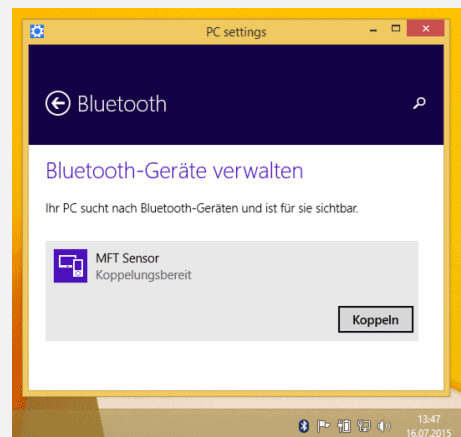
Daher muss der Bluetooth-Sensor der Challenge Disc gekoppelt werden, bevor die Anwendung COORDI verwendet wird. Allerdings ist dies nur einmal vor der ersten Verwendung des Programmes notwendig. Ist der Koppelungsvorgang einmal erfolgreich abgeschlossen, so merkt sich das Betriebssystem das Gerät. Es steht damit für weitere Verwendungen sofort zur Verfügung.

Die folgende Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt, wie Sie die Challenge Disc mit Ihrem System koppeln können. Auch wenn die Abbildungen ein Deutschsprachiges Windows 8.1 Enterprise zeigen, so hat die Anleitung auch für alle anderen Varianten von Windows 8.1 oder Windows 10 Gültigkeit.

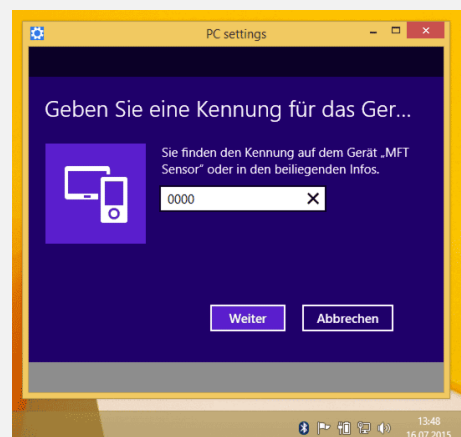
Schritt 1	 <p>Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf das Bluetooth-Symbol in der Taskleiste.</p> <p>Alternativ dazu können Sie in der Systemsteuerung im Abschnitt "Geräte und Drucker" auf "Gerät hinzufügen" klicken (danach mit Schritt 3 fortfahren)</p>
Schritt 2	 <p>Im Kontextmenü wählen Sie "Bluetooth-Netzwerkgeräte anzeigen" aus.</p>

Schritt 3

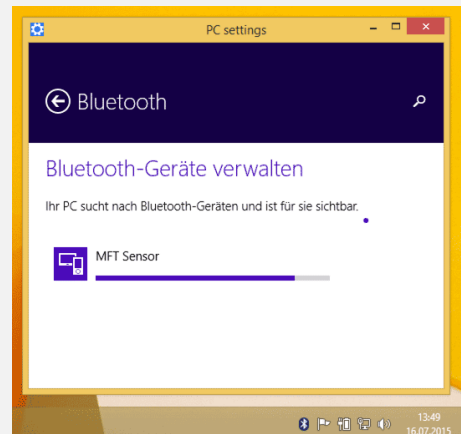
Bewegen Sie Ihre Challenge Disc um den Bluetooth-Sensor aufzuwecken. Der Sensor erscheint daraufhin unter dem Namen **"MFT Sensor"** in der Liste der gefundenen Geräte. Klicken Sie auf diesen Eintrag.

Schritt 4

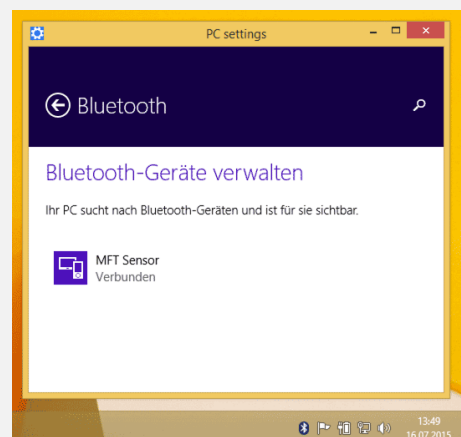
Wählen Sie nun **"Koppeln"** aus.

Schritt 5

Windows fragt nun nach einer Kennung. Geben Sie **0000** ein und klicken Sie dann auf **"Weiter"**.

Schritt 6

Windows stellt nun eine Verbindung zu dem Bluetooth-Sensor her. Bewegen Sie dabei wieder die Challenge Disc, damit der Sensor nicht in den Stromspar-Modus zurückschaltet.

Schritt 7

Zeigt der Sensor-Status nun wie abgebildet "**Verbunden**" an, dann war das Koppeln erfolgreich und Sie können nun die Anwendung COORDI mit Ihrer Challenge Disc verwenden!

Ist hingegen ein Fehler aufgetreten, dann versuchen Sie es nochmals und wiederholen dazu die angegebenen Schritte.